



# ACTOANID® SPRAY

Schnelle alkoholfreie Sprühdeseinfektion für medizinische Geräte und Oberflächen


Art.-Nr. 05.1230.1  
05.1230.45  
05.1230.5

### Wirkungsspektrum/ Einwirkzeit


| Einsatzgebiet                                       | Einwirkzeit |
|---|-------------|
| bakterizid (inkl. MRSA)                             | 60 Sek.     |
| begrenzt viruzid (Vaccinia-, Rota- und Coronaviren) | 60 Sek.     |
| fungizid ( <i>Candida albicans</i> )                | 60 Sek.     |

Inhaltsstoffe: In 100 g Lösung sind enthalten: 0,23 g Polyhexamethylenbiguanid hydrochlorid; 0,28 g quartäre Ammoniumverbindungen und Hilfsstoffe.

**WICHTIG:** Bitte vor Anwendung Sicherheitsdatenblatt und Produktinformationsblatt lesen und verstehen!

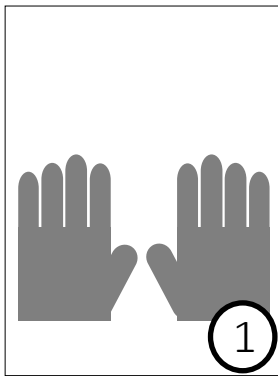


Handschuhe/geeignete Schutzkleidung sind vor Anwendung anzuziehen.

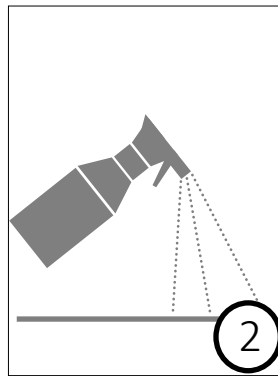

Oberflächen/Geräte aus ca. 30 cm Entfernung benetzen.



Einwirkzeit abwarten.

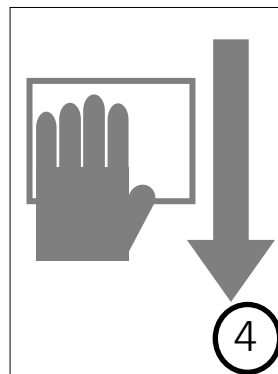

Mit einem sauberen Tuch in einer Bewegung - von der sauberen zur kontaminierten Fläche hin - abwischen und lufttrocknen lassen. NICHT TROCKEN REIBEN!

### Merkmale:

- geeignet für die Schnelldeinfektion von Laboren, Sanitärbereichen, medizinischen Geräten und Inventar in Krankenhäusern, Arzt- und Zahnarztpraxen (z.B. OP-Tische, Inkubatoren, Stethoskope u.a.)
- älkohol-, aldehyd- und phenolfrei!
- enthält Polyhexanid! - Kann allergische Reaktionen hervorrufen
- optimale Oberflächenverträglichkeit
- empfohlene Anwendungstemperatur: 19°C - 21°C

### Lagerung:

- bei Raumtemperatur lagern
- von Kindern fernhalten

Diese Anweisung einschl. alle Teile, ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwendung außerhalb der engen Grenzen des Urheberrechtsgesetzes ist ohne ausdrückliche schriftliche Zustimmung der ACTO GmbH unzulässig und strafbar.