



Produktdatenblatt



Actoclean[®] Flüssig – Konzentriertes Desinfektionsmittel für medizinische Instrumente und Endoskope

Eigenschaften

- aldehyd-, phenol- und phosphatfrei
- für (zahn)medizinisches Inventar und Endoskope
- empfohlene Nutzungskonzentration: 1% (10 ml Konzentrat auf 990 ml Wasser)
- bakterizid in 15 Minuten
- hervorragende Materialkompatibilität
- beugt Korrosion vor
- frei von Farb- und Geruchsstoffen
- Medizinprodukt Klasse II B



Gebrauchsanweisung und Anwendungsgebiete

Vor Anwendung geeignete Schutzkleidung anziehen. **Actoclean[®] Flüssig** eignet sich für die Desinfektion von zahnärztlichen, chirurgischen und medizinischen Instrumenten, z.B. aus Glas, Keramik und Kunststoff sowie für die Desinfektion von thermolabilen Geräten, die Gummi und Elastomere enthalten. **Actoclean[®] Flüssig** ist ein Konzentrat, das in gewünschter Konzentration angesetzt werden muss. Die Wassertemperatur sollte zwischen 15°C und 45°C liegen. Zur Herstellung der Lösung Dosierpumpe verwenden. Mischverhältnis von Konzentrat und Wasser sowie Desinfektionsdauer können je nach Verschmutzungsgrad variiert werden. Instrumente/Endoskope nach Benutzung demontieren und für ca. 15 Min. in die Gebrauchslösung legen. Darauf achten, dass sämtliche Oberflächen und Hohlräume benetzt sind. Je nach Verschmutzung kann eine mechanische Reinigung durch Bürsten erforderlich sein. Nach der Desinfektion die Instrumente/Endoskope gründlich mit Wasser abspülen und trocknen. Instrumente visuell auf Sauberkeit überprüfen und Vorgang ggf. wiederholen. Die Gebrauchslösung ist zum Einmalgebrauch bestimmt. Nach 24 Stunden muss die unbenutzte Gebrauchslösung erneuert werden. Instrumente nicht länger als die empfohlene Einwirkzeit in der Lösung lagern, da die wässrige Lösung langfristig Korrosion bei empfindlichen Instrumenten und Geräten verursachen kann.

Dosierungstabelle

Endvolumen	1%ige Lösung	
	Actoclean [®] Flüssig	Wasser
1 L	10 ml	990 ml
5 L	50 ml	4950 ml
10 L	100 ml	9900 ml

Wirkungsspektrum/ Einwirkzeiten

Wirkungsspektrum	Einwirkzeit	Konzentration
Bakterizid	15 Min.	1 %

Zusätzliche Informationen

Vor Gebrauch stets Gebrauchsanweisung und Sicherheitsdatenblatt lesen.

Auszug aus den Produktinformationen

100 g Lösung enthält: 10 g nichtionische Tenside; 0,8 g Benzalkoniumchlorid; Korrosionsinhibitoren und Hilfsstoffe. **Sicherheitshinweise: Gefahr!** Schutzkleidung tragen. Gesundheitsschädlich bei Verschlucken. BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen. Verursacht Hautreizungen. BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser und Seife waschen. Verursacht schwere Augenschäden. BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen. Nicht in die Augen, auf die Haut oder auf die Kleidung gelangen lassen. Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen. Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. Nur im Originalbehälter, dicht verschlossen und für Kinder unzugänglich aufbewahren. Bei Raumtemperatur lagern. Vor Anwendung Gebrauchsanweisung lesen. Haltbar 3 Jahre bei Raumtemperatur. Geöffnete Verpackung innerhalb von 6 Wochen verbrauchen. **Entsorgung:** Inhalt/Behälter gemäß nationalen Vorschriften einer Entsorgung zuführen.

Chemisch-physikalische Eigenschaften

Aussehen: hellgelbe Flüssigkeit

Geruch: charakteristisch

pH-Wert: ≥9 - ≤11 bei 20°C

Lieferform

Einheit	Artikel-Nr.
5 L	02.0801.5

ACTO GmbH
Büchnerstr. 11
38118 Braunschweig
Germany

Tel: +49 (0) 531 / 239 50 80
Fax: +49 (0) 531 / 239 50 81 1
Mail: info@actogmbh.com