

ACTODENT® BOHRERBAD

Desinfektionsmittel für alle Arten von medizinischen Instrumenten, insbesondere für Bohrfräsen

Art.-Nr. 01.0501.2



UN 1903
GEFAHR!



Inhaltsstoffe: In 100 g Lösung sind enthalten: 0,72 g N,N-Didecyl-N-methylpoly(oxyethyl)ammoniumpropionat; 0,59 g N-(3-Aminopropyl)-N-dodecylpropan-1,3-diamin; Korrosionsinhibitoren und Hilfsstoffe.

WICHTIG: Bitte vor Anwendung Sicherheitsdatenblatt und Produktinformationsblatt lesen und verstehen.

Wirkungsspektrum/ Einwirkzeit
(bezogen auf das Konzentrat Actosed® Endo)

Einsatzgebiet	Einwirkzeit
bakterizid, inkl. Tuberkulose	15 Min.
fungizid	15 Min.


Für die manuelle Anwendung sowie zur Anwendung in Ultraschallgeräten geeignet.

Bei Ultraschallreinigung halten Sie sich bitte an die Anweisung des Ultraschallschallreinigungsgerätes.


Anwendungsdauer im Ultraschallgerät: 5 Min.

Merkmale:


- geeignet für die Desinfektion von Bohrfräsen, weiteren zahnärztlichen Materialien und Laborutensilien aus Glas, Porzellan, Keramik und Metall.
- gebrauchsfertig
- frei von Aldehyden, Phenolen und Phosphaten!

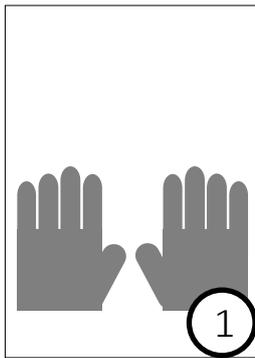


Herstellerhinweise beachten. Geeignete Schutzhandschuhe, -brille und -kleidung tragen.

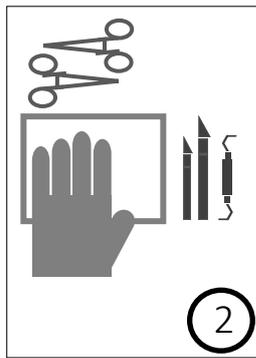


Vor Anwendung **Actodent® Bohrerbad** sind die medizinischen Geräte/Instrumente gründlich zu reinigen und falls nötig zu demonstrieren.

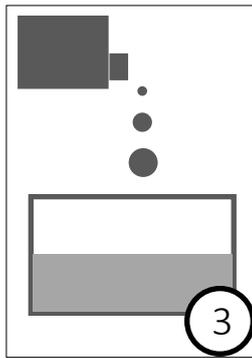


Das Mittel vorsichtig in benötigter Menge in die z.B. Desinfektionswanne geben. *

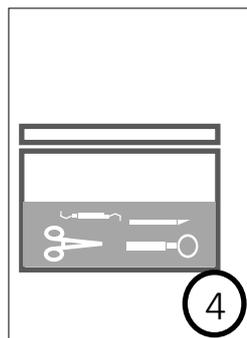

Instrumente und Geräte in die Lösung legen. Auf vollständige Bedeckung achten.

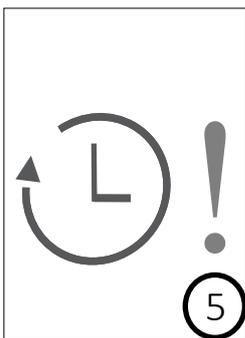

Instrumente nicht länger als empfohlen in der Lösung belassen, da die wässrige Lösung langfristig Korrosion verursachen kann!

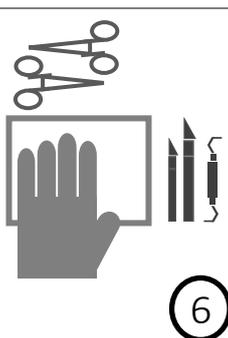

Instrumente herausnehmen und mit destilliertem/sterilisiertem Wasser gründlich spülen und trocknen. Trockene Instrumente visuell auf Sauberkeit kontrollieren. Je nach Erfordernissen die Instrumente/Geräte weiter

Lagerung:

- bei Raumtemperatur lagern
- von Kindern fernhalten

Wiederverwendbar für bis zu 15 Tage - Wirksamkeit durch Teststreifen prüfen!

Bei vorzeitiger Kontamination die Lösung vor Ablauf der 15 Tage erneuern!



* Je nach Präparat ggf. 2 Wannen für getrennte Reinigungs- und Desinfektionsschritte einsetzen (Zwischenspülung durchführen).

** Falls nach Ablauf der Einwirkzeit verbliebene Verschmutzungen mechanisch entfernt werden müssen, ist der Desinfektionsschritt danach zu wiederholen.