

ACTODENT® SPRAY

Pflegespray zur Wartung von Dental-Turbinen

Art.-Nr. 03.7403.400




UN 1950
GEFAHR!




Inhaltsstoffe: Paraffinöl und Propan/Butan als Treibmittel.

WICHTIG: Bitte vor Anwendung Sicherheitsdatenblatt und Produktinformationsblatt lesen und verstehen.

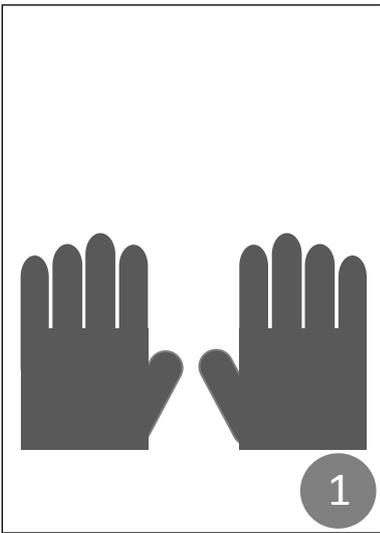

Handschuhe sind vor Anwendung anzuziehen.

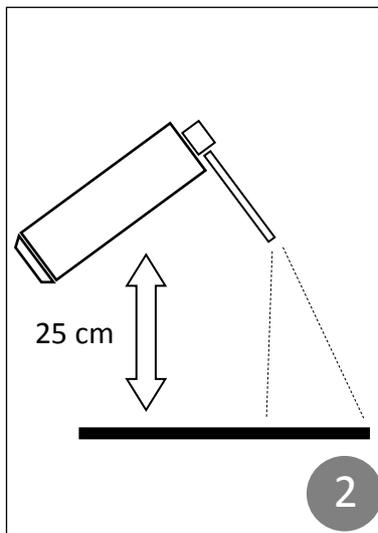


Zweimal täglich und vor jeder Sterilisation die Oberflächen aus ca. 25 cm Entfernung 1 Sekunde lang benetzen.

Merkmale:


- geeignet für Turbinen; Hand- und Winkelstücke, sowie deren Köpfe.
- geruchslos
- antistatisch

Lagerung:

- Bei Raumtemperatur lagern
- Vor direkter Sonneneinstrahlung, Zündquellen und Temperaturen über 50°C schützen.
- Von Kindern fernhalten.

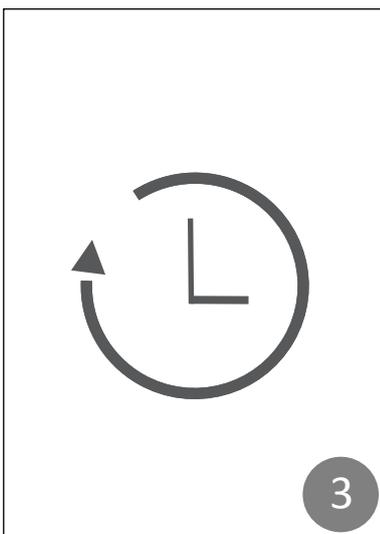

Kurz einwirken lassen.

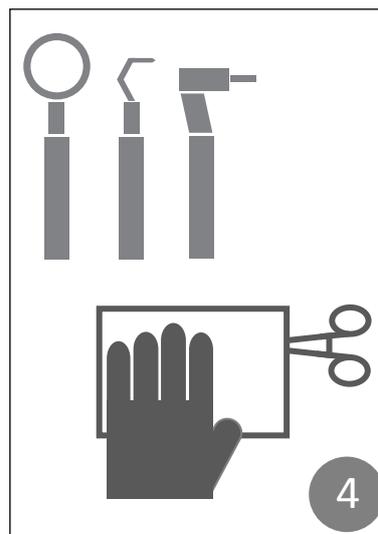

Mit einem sauberen, weichen Tuch gründlich abwischen.

Diese Anweisung einschl. aller Teile, ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwendung außerhalb der engen Grenzen des Urheberrechtsgesetzes ist ohne ausdrückliche schriftliche Zustimmung der ACTO GmbH unzulässig und strafbar.