



Produktdatenblatt



Actodent® Spray – Pflegespray zur Wartung von Dental-Turbinen

Eigenschaften

- basiert auf medizinischem Weißöl
- silikonfrei
- geruchlos
- Instandhaltung von rotierenden Instrumenten
- antistatisch
- weder toxisch noch allergen
- geeignet zur häufigen Anwendung
- Medizinprodukt Klasse I



Gebrauchsanweisung

Handschuhe sind vor Anwendung anzuziehen. Vor dem Gebrauch Spraydose kräftig schütteln. Zweimal täglich und vor jeder Sterilisation die Oberflächen aus ca. 25 cm Entfernung ca. 1 Sekunde lang benetzen. Kurz einwirken lassen. Mit einem sauberen, weichen Tuch gründlich abwischen. Anschließend gegebenenfalls sterilisieren/ desinfizieren.

Anwendungsgebiete

Actodent® Spray dient zur Wartung von Turbinen und zahnärztlichen Instrumenten aus Metall. Es eignet sich für die Schmierung aller Instrumente, die eine Metall-auf-Metall-Wirkung haben, wie Scheren, Arterienklemmen, Nadelhalter, selbsthaltende Wundspreizer usw.

Zusätzliche Informationen

Vor Gebrauch stets Gebrauchsanweisung und Sicherheitsdatenblatt lesen.

Auszug aus den Produktinformationen

Inhaltsstoffe: Paraffinöl und Propan/ Butan als Treibmittel. **Sicherheitshinweise:** **GEFAHR!** Extrem entzündbares Aerosol. Behälter steht unter Druck: Kann bei Erwärmung bersten. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen sowie anderen Zündquellenarten fernhalten. Nicht rauchen. Nicht gegen offene Flammen oder andere Zündquellen sprühen. Nicht durchstechen oder verbrennen, auch nicht nach Gebrauch. Vor Sonnenbestrahlung schützen. Nicht Temperaturen über 50°C aussetzen. Haltbar 3 Jahre bei Raumtemperatur. Geöffnete Verpackung innerhalb von 6 Wochen verbrauchen. **Entsorgung:** Inhalt/Behälter der Sonderabfallsammlung zu zuführen.

Chemisch-physikalische Eigenschaften

Aussehen: farbloses Aerosol

Geruch: charakteristisch

Lieferform

Einheit	VPE	Artikel Nr.
400 ml	12	03.7403.400