



Gebrauchsanweisung

ACTOSAL® FLÄCHE AF

Oberflächen- und Instrumentendesinfektionsmittel

Art.-Nr. 05.5502.5



ACTO GmbH

Büchnerstr. 11
38118 Braunschweig
info@actogmbh.com



+49 (0) 531 239 50 80

(Mo-Fr 9.00 - 16.30 Uhr) Ortstarif



UN 1903
GEFAHR!

Dosierungstabelle

Konzentration	0,5 %	1 %
Wasser		
1 L	5 ml	10 ml
5 L	25 ml	50 ml
10 L	50 ml	100 ml
20 L	100 ml	200 ml


Wirkungsspektrum/ Einwirkzeit

Mikrobiologische Aktivität	Konzentration	
	0,5 %	1 %
bakterizid	60 Min.	15 Min.
fungizid (<i>Candida albicans</i>)	60 Min.	15 Min.




Wassertemperatur
max.

25 °C

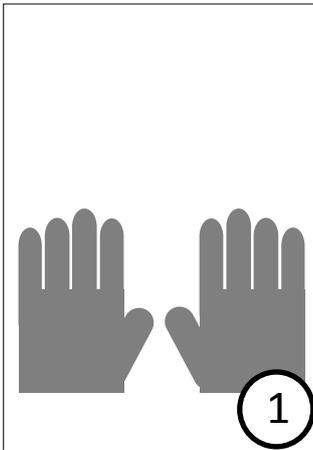


1

Vor Anwendung sind Handschuhe und Schutzkleidung anzuziehen.

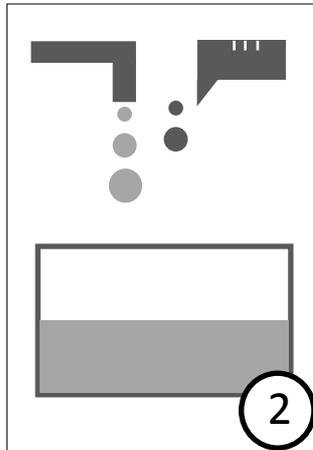


2

Actosal® Fläche AF in gewünschter Konzentration in einem Wisch-/Eimer ansetzen.

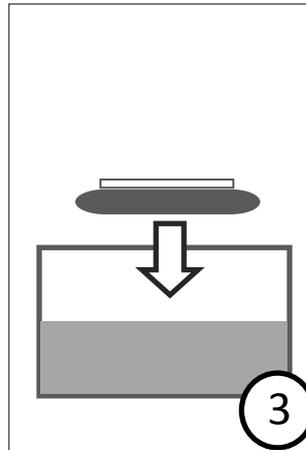


3

Tuch oder Wischmopp in der Flüssigkeit tränken.

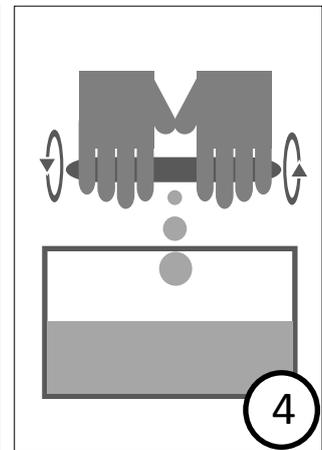


4

Tuch oder Wischmopp auswringen.

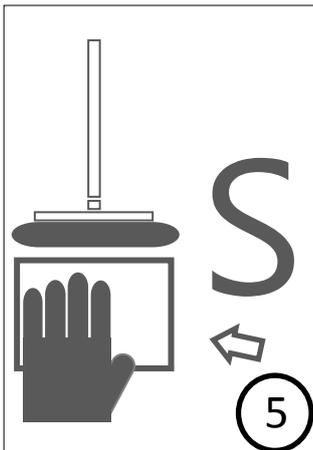

5

Die Reinigung/ Desinfektion erfolgt immer von der kontaminierten zur sauberen Fläche hin in z.B. „S“ Form.

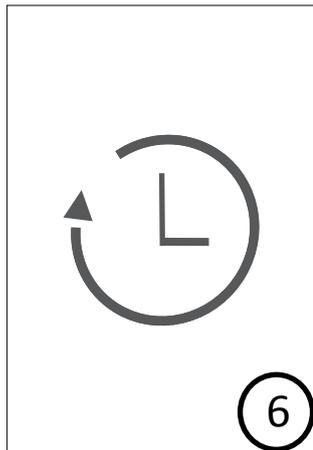

6

Den desinfizierten Bereich nicht vor Trocknung betreten. Abschließend alle benutzten Gegenstände und Materialien waschen, desinfizieren und trocknen.

WICHTIG: Bitte vor Anwendung Sicherheitsdatenblatt und Produktinformationsblatt lesen und verstehen.

Merkmale:

- Aldehyd- und Phenolfrei
- Geeignet für die Desinfektion von Oberflächen, Geräten und Inventar in medizinischen Bereichen, wie Krankenhäusern, Arzt- und Zahnarztpraxen und Pflegeheimen (z.B. OP-Tische, Inkubatoren u.a.)

- Empfohlene Anwendungstemperatur: 19°C - 21°C

Lagerung:

- Lagerung bei Raumtemperatur
- Von Kindern fernhalten

Diese Anweisung einschl. aller Teile, ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwendung außerhalb der engen Grenzen des Urheberrechtsgesetzes ist ohne ausdrückliche schriftliche Zustimmung der ACTO GmbH unzulässig und strafbar.