



Produktdatenblatt



Actosal[®] Fläche AF - Oberflächen- und Instrumentendesinfektionsmittel

Eigenschaften

- basiert auf quartären Ammoniumverbindungen
- aldehyd- und phenolfrei
- wirkt bakterizid und fungizid in 15 Min. bei 1%iger Lösung
- Konzentriert
- Desinfiziert, reinigt und desodoriert in nur einem Anwendungsschritt
- kein Nachspülen erforderlich
- Sicher für den Einsatz in verschiedenen Umgebungen, z.B. Restaurants, Wohnräumen, medizinischen Einrichtungen, Kindertagesstätten u.a.
- empfohlene Nutzungskonzentration: 1 %ige Lösung (10 ml Konzentrat auf 1 Liter)
- hohe Oberflächenkompatibilität
- Biozidprodukt



Gebrauchsanweisung

Es wird empfohlen vor Anwendung Schutzhandschuhe anzuziehen. Actosal[®] Fläche AF ist ein Konzentrat und muss verdünnt werden. Die empfohlene Nutzungskonzentration liegt bei 1%, das sind 10 ml Konzentrat auf 1 L Wasser. Die Gebrauchslösung wird mit einem sauberen Tuch/ Mopp auf die Oberflächen/Geräte in einer Bewegung von der sauberen zur kontaminierten Fläche hin aufgetragen. 15 - 60 Min. einwirken lassen, je nach eingesetzter Konzentration. Die desinfizierten Oberflächen/Geräte erst nach vollständiger Trocknung wiederverwenden. Abschließend alle benutzten Materialien (Mopp etc.) waschen, desinfizieren und trocknen.

Anwendungsgebiete

Actosal[®] Fläche AF dient der Desinfektion von Oberflächen, Geräten und Inventar in medizinischen Bereichen, wie Krankenhäusern, Arzt- und Zahnarztpraxen und Pflegeheimen (z.B. OP-Tische, Inkubatoren, Sonden usw.).

Empfohlene Anwendungstemperatur: 19°C - 21°C.

Dosierungstabelle

Konzentration	0,5 %	1 %
Wasser		
1 L	5 ml	10 ml
5 L	25 ml	50 ml
10 L	50 ml	100 ml

Wirkungsspektrum

Mikrobiologische Aktivität	Konzentration	
	0,5 %	1 %
bakterizid	60 Min.	15 Min.
fungizid (<i>Candida albicans</i>)	60 Min.	15 Min.

Zusätzliche Informationen

Vor Gebrauch stets Gebrauchsanweisung und Sicherheitsdatenblatt lesen.

Auszug aus den Produktinformationen

100 g Lösung enthält: 9,9 g Didecyldimethylammoniumchlorid und Hilfsstoffe. **Sicherheitshinweise: Gefahr!** Geeignete Schutzkleidung tragen. Gesundheitsschädlich bei Verschlucken. BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen. Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden. BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen. BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen. BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen. Nur im Originalbehälter, dicht verschlossen, an einem kühlen, gut belüfteten Ort, bei Raumtemperatur lagern. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung. Vor Anwendung alle Sicherheitshinweise und die Gebrauchsanweisung lesen und verstehen. Haltbar 3 Jahre bei Raumtemperatur. Geöffnete Verpackung innerhalb von 6 Wochen verbrauchen. **Entsorgung:** Entsorgung gemäß den örtlichen Vorgaben.

Chemisch-physikalische Eigenschaften

Aussehen: farblose Flüssigkeit

Geruch: charakteristisch

pH-Wert: 11 - 14 bei 20 °C

Lieferform

Einheit	Artikel-Nr.
5 L	05.5502.5

ACTO GmbH
Büchnerstr. 11
38118 Braunschweig
Germany

Tel: +49 (0) 531 / 239 50 80
Fax: +49 (0) 531 / 239 50 81 1
Mail: info@actogmbh.com