



ACTOSAL® PA POWDER

Konzentriertes High-level Desinfektionsmittel für Böden, Oberflächen und Umwelt

Art.-Nr. 05.1036.50 05.1036.5



Inhaltsstoffe: In 100 g Lösung sind enthalten: Kaliummonopersulfat 50%; Reinigungsmittel; Korrosionsschutzmittel und Hilfsstoffe.

WICHTIG: Bitte vor Anwendung Sicherheitsdatenblatt und Produktinformationsblatt lesen und verstehen.


| Wirkungsspektrum/ Einwirkzeit | |
|---|-------------------------|
| Einsatzgebiet | Konzentration (0,5%) |
| bakterizid | 5 Min. |
| tuberkulozid | 5 Min. |
| fungizid | 5 Min. |
| viruzid (Adeno-, Noro-, Polio- und Enteroviren) | 10 Min. |
| sporozid | 60 Min. |
| Bakteriophagen | 10 Min. |

Dosierung


5 g Actosal® PA Powder für 1 L Wasser

25 g Actosal® PA Powder für 5 L Wasser

50 g Actosal® PA Powder für 10 L Wasser

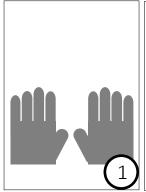

Herstellerhinweise beachten. Geeignete Schutzhandschuhe, -brille und Pulver vorsichtig in -kleidung tragen. Konzentration

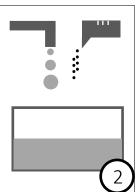

Zunächst Wasser, dann das Pulver vorsichtig in benötigter Konzentration in die Desinfektionswanne geben und verrühren.



Lassen Sie das Pulver 5-10 Min. auflösen bis eine klare, transparente, rosafarbene Lösung entstanden ist. Die Farbe ist ein Indiz für die Aktivität der Lösung.

Merkmale:

- frei von Aldehyden und Phenolen
- täglich frisch zubereiten
- empfohlene Nutzungskonzentration: 0,5%

Lagerung:

- von Kindern fernhalten
- bei Raumtemperatur lagern

Anwendung im Wischverfahren zur Reinigung und Desinfektion von Böden und im Reibverfahren für andere Oberflächen.

Die Reinigung sollte von der sauberen zur kontaminierten Fläche hin erfolgen. Die gereinigten/ desinfizierten Böden/ Oberflächen erst nach vollständiger Trocknung wieder betreten/ verwenden.



Diese Anweisung einschl. aller Teile, ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwendung außerhalb der engen Grenzen des Urheberrechtsgesetzes ist ohne ausdrückliche schriftliche Zustimmung der ACTO GmbH unzulässig und strafbar.