

# ACTOSED® ENDO TERRA

Biguanidbasiertes Konzentrat zur Desinfektion medizinischer Instrumente und Endoskope

Art.-Nr. 01.4702.2  
01.4702.5



**ACTO GmbH**  
Bücherstr. 11  
38118 Braunschweig  
info@actogmbh.com  
+49 (0) 531 239 50 80  
(Mo-Fr 9.00 - 16.30 Uhr) Ortstarif




Inhaltsstoffe: In 100 g Lösung sind enthalten: 10 g Alkyldimethylethylammoniummethosulfat; 3,6 g Cocospropyldiaminguanidiniumacetat; 2 g Polyhexamethylenbiguanid; Korrosionsinhibitoren und Hilfsstoffe.

Wirkungsspektrum/ Einwirkzeit			
Wirkungsspektrum	1%	2%	3%
bakterizid, inkl. Tuberkulose	60 Min.	30 Min.	15 Min.
fungizid	60 Min.	30 Min.	15 Min.
viruzid (HBV, BVDV und Vacciniaviren)	ohne Belastung		mit Belastung
	1% und 60 Min. 2% und 15 Min. 3% und 5 Min.		2% und 30 Min. 3% und 5 Min.
	Im Ultraschallbad		
			5 Min.



**WICHTIG:** Vor Anwendung Gebrauchsanweisung und Sicherheitsdatenblatt lesen und verstehen.

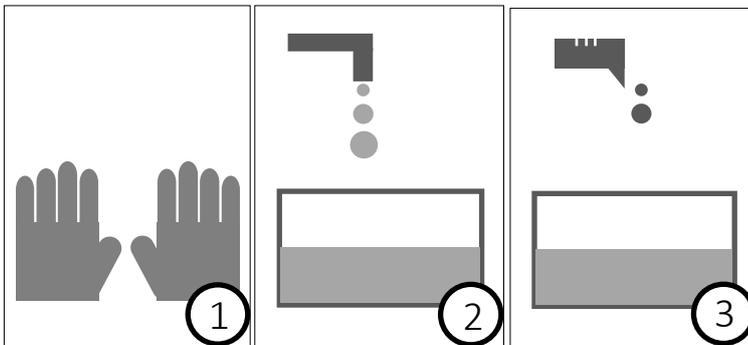

Herstellerhinweise beachten. Geeignete Schutzhandkleidung tragen.

Vor Verwendung ist die Desinfektionswanne mit z.B. Actoclean® Flüssig und klarem Wasser\* gründlich vorreinigen, um Rückstände anderer, insbesondere aldehydhaltiger, Chemikalien zu entfernen. Die Instrumentenwanne anschließend mit Wasser (Zimmertemperatur) füllen\*\*.

Das Mittel mit geeignetem Dosiersystem abmessen und ins Wasser geben. Die Wassertemperatur sollte 25°C nicht überschreiten.


**Merkmale:**

- Geeignet für die Desinfektion bei gleichzeitiger Reinigung, besonders für chirurgische Instrumente aller Art, z.B. aus der MIC-Chirurgie, Anästhesiematerialien, thermolabile und thermostabile Materialien und für alle Ultraschallgeräte.
- Frei von Aldehyden, Phenolen und quartären Ammoniumverbindungen!

**Lagerung:**

- Bei Raumtemperatur lagern
- Von Kindern fernhalten.

**Wiederverwendbar für bis zu 15 Tage - Wirksamkeit durch Teststreifen prüfen! Bei vorzeitiger Kontamination die Lösung vor 15 Tagen erneuern!**

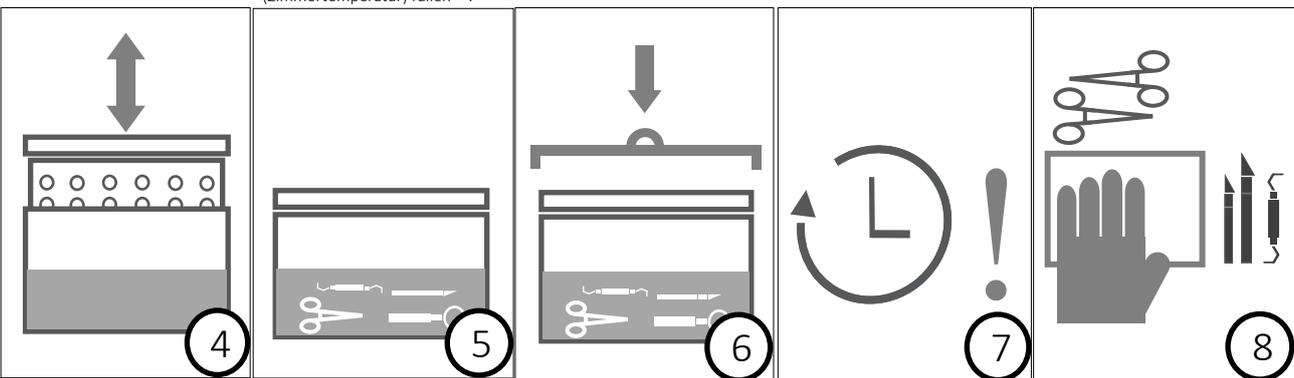

Zum Vermischen Sieb auf- und ab-bewegen. Bei unbelasteter Gebrauchslösung ist die Wirksamkeit für bis zu 15 Tage gegeben.

Instrumente und Geräte nach Benutzung demontieren und in die Lösung legen. Auf vollständige Bedeckung achten.

Wanne schließen.

Einwirkzeit je nach Produkt abwarten. ACHTUNG! Die Einwirkzeit beginnt mit dem jeweils letzten abgeworfenen Instrument.\*\*\*

Instrumente gründlich spülen und trocknen. Trockene Instrumente visuell auf Sauberkeit kontrollieren. Je nach Erfordernissen die Instrumente / Geräte weiter aufbereiten.

\* Das Wasser sollte mindestens Trinkwasserqualität besitzen.

\*\* Je nach Präparat ggf. 2 Wannen für getrennte Reinigungs- und Desinfektionsschritt einsetzen (Zwischenspülung durchführen)

\*\*\* Falls nach Ablauf der Einwirkzeit verbliebene Verschmutzungen mechanisch entfernt werden müssen, ist der Desinfektionsschritt danach zu wiederholen.

Diese Anweisung einschl. alle Teile, ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwendung außerhalb der engen Grenzen des Urheberrechtsgesetzes ist ohne ausdrückliche schriftliche Zustimmung der ACTO GmbH unzulässig und strafbar.