



Gebrauchsanweisung

ACTOSEPT® AF CITRUS

schnelle alkoholhaltige Sprühdeseinfektion für medizinische Geräte und Oberflächen mit Zitronenduft

Art.-Nr. 05.2401.1
05.2401.45
05.2401.5

Inhaltsstoffe: In 100 g Lösung sind enthalten: 50 g 1-Propanol; 10 g 2-Propanol; Didecylmethylpolyoxyethylammoniumpropionat, Parfum und Hilfsstoffe.

Wirkungsspektrum/Einwirkzeiten

Mikrobiologische Aktivität	Konzentration (100%)
bakterizid	1 - 5 Min.
fungizid	1 - 5 Min.
begrenzt viruzid (Vacciniaviren)	5 Min.



ACTO GmbH
Büchnerstr. 11
38118 Braunschweig
info@actogmbh.com




+49 (0) 531 239 50 80
(Mo-Fr 9.00 - 16.30 Uhr) Ortstarif




UN 1987
GEFAHR!


WICHTIG: Bitte vor Anwendung Sicherheitsdatenblatt und Produktinformationsblatt lesen und verstehen.

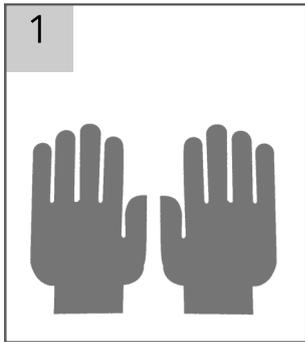


1 Handschuhe sind vor Anwendung anzuziehen.

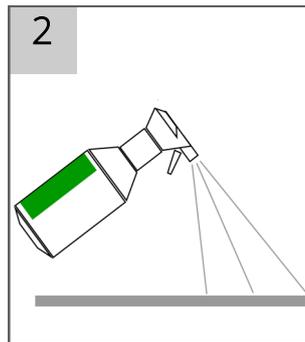

2 Oberflächen/Geräte aus ca. 30 cm Entfernung benetzen.

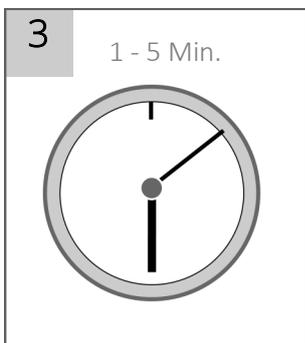

3 Einwirkzeit abwarten.

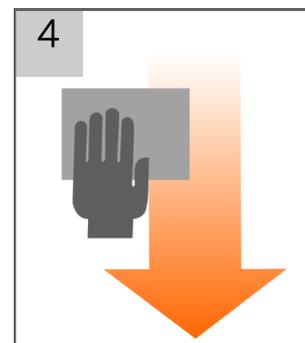

4 Mit einem sauberen Tuch in einer Bewegung - von der sauberen zur kontaminierten Fläche hinabwischen und lufttrocknen lassen. NICHT TROCKEN REIBEN!

Merkmale:

- geeignet für die schnelle Desinfektion alkoholbeständiger Oberflächen, Geräten und Inventar in Krankenhäusern, Arzt- und Zahnarztpraxen, Pflegeheimen und Kliniken (z.B. OP-Tische, Inkubatoren u.a.)
- NICHT bei alkoholempfindlichen Oberflächen anwenden
- gebrauchsfertig
- frei von Aldehyden, Phenolen und Farbstoffen
- Anwendungstemperatur: 19°C - 21°C

Lagerung:

- Bei Raumtemperatur lagern
- Vor direkter Sonneneinstrahlung, Zündquellen und Temperaturen über 50°C fernhalten
- Von Kindern fernhalten

Diese Anweisung einschl. alle Teile, ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwendung außerhalb der engen Grenzen des Urheberrechtsgesetzes ist ohne ausdrückliche schriftliche Zustimmung der ACTO GmbH unzulässig und strafbar.