



Produktdatenblatt



Actosept® AF Citrus – alkoholhaltiges Sprühdeseinfektionsmittel für medizinische Geräte und Oberflächen mit Zitronenduft

Eigenschaften

- Kombination aus Ethanol, Isopropanol und quartären Ammoniumverbindungen
- frei von Aldehyden, Phenolen und Farbstoffen
- gebrauchsfertig
- bakterizid und fungizid in 1 Min., begrenzt viruzid in 5 Min.
- hervorragende Materialkompatibilität (Ausnahme: Acrylglas und alkoholsensitive Oberflächen)
- schnelle Trocknung ohne Rückstände; kein Nachspülen notwendig
- Klasse II A Medizinprodukt



Gebrauchsanweisung

Actosept® AF Citrus ist eine gebrauchsfertige Sprühdeseinfektionslösung. Die zu desinfizierenden Gegenstände vollständig aus 30 cm Entfernung benetzen, 1-5 Min. einwirken lassen und mit einem trockenen, sauberen Tuch die Gegenstände/Oberflächen in einer Bewegung von der sauberen zur kontaminierten Fläche hin, reinigen. Nicht trocken reiben! Die Restfeuchtigkeit trocknet nach kurzer Zeit rückstandslos ab. Gegenstände/Oberflächen erst nach vollständiger Trocknung wieder benutzen.

Anwendungsgebiete

Actosept® AF Citrus ist geeignet zur schnellen Desinfektion von alkoholbeständigen Oberflächen, Geräten und Inventar in Krankenhäusern, Arzt- und Zahnarztpraxen, Pflegeheimen und Kliniken (z.B. OP-Tische, Inkubatoren, Sonden usw.). Nicht bei alkoholempfindlichen Oberflächen anwenden.

Die empfohlene Anwendungstemperatur liegt zwischen 19°C und 21°C.

Wirkungsspektrum / Einwirkzeiten

Mikrobiologische Aktivität	Konzentration (100%)
bakterizid	1 Min. /5 Min.
fungizid	1 Min. /5 Min.
begrenzt viruzid (Vacciniaviren)	5 Min.

Zusätzliche Informationen

Vor Gebrauch bitte stets Gebrauchsanweisung und Sicherheitsdatenblatt lesen.

Auszug aus den Produktinformationen

100 g Lösung enthält: 20 g Ethanol; 10 g Isopropanol; 0,05 g Didecylmethylammoniumpropionat; Parfum und Hilfsstoffe. **Sicherheitshinweise:** **GEFAHR!** Flüssigkeit und Dampf entzündbar. Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen sowie anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen. Verursacht schwere Augenreizung. BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen. Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ ärztliche Hilfe hinzuziehen. BEI KONTAKT MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen. Nur im Originalbehälter, dicht verschlossen, an einem gut belüfteten Ort, bei Raumtemperatur und für Kinder unzugänglich aufbewahren. Ist ärztlicher Rat erforderlich Verpackung oder Kennzeichnung bereithalten. Nach Gebrauch Hände gründlich waschen. Haltbar 3 Jahre bei Raumtemperatur. Geöffnete Verpackung innerhalb von 6 Wochen verbrauchen. **Entsorgung:** Entsorgung gemäß den örtlichen Vorgaben.

Chemisch-physikalische Eigenschaften

Aussehen: farblose Flüssigkeit

Geruch: zitronig

pH Wert: >6,5 - <8,5 bei 20°C

Lieferform

Einheit	Artikel-Nr.
1 L	05.2401.1
5 L Kombi	05.2401.45
5 L	05.2401.5