

ACTOSEPT[®] AF TÜCHER

Alkohohaltige Oberflächendesinfektionstücher

Art.-Nr. 05.3101.100
05.3101.150
05.3101.100L
05.3101.150L



UN 1987
GEFAHR!

ACTO GmbH
Büchnerstr. 11
38118 Braunschweig
info@actogmbh.com

 **+49 (0) 531 239 50 80**
(Mo-Fr 9.00 - 16.30 Uhr) Ortstarif




Inhaltsstoffe: In 100 g Tränkflüssigkeit Actosept[®] AF sind enthalten: 50 g Ethanol; 10 g 2-Propanol; Didecylmethylpolyoxyethylammoniumpropionat und Hilfsstoffe.

WICHTIG: Bitte vor Anwendung Sicherheitsdatenblatt und Produktdatenblatt lesen und verstehen.


Actosept[®] AF Tücher darf **nicht** benutzt werden, wenn die Verpackung beschädigt ist!

Folgende Arbeitsschritte **müssen** eingehalten werden, um jegliche Kontamination zu vermeiden!

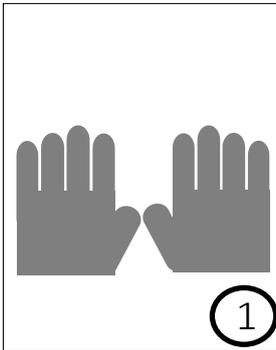


1

Vor Gebrauch Hände mit einem geeigneten Händedesinfektionsmittel desinfizieren und Handschuhe anziehen.

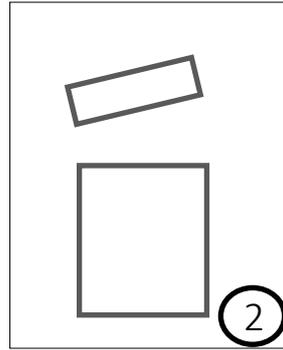


2

Beim erstmaligen Öffnen Deckel abnehmen.

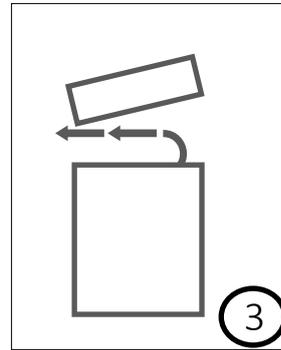


3

Verpackungsfolie entfernen.

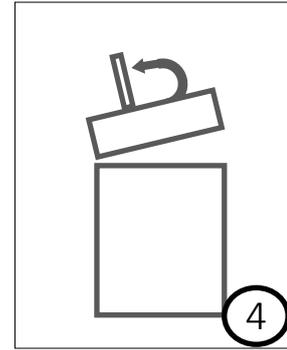


4

Klappdeckel öffnen.

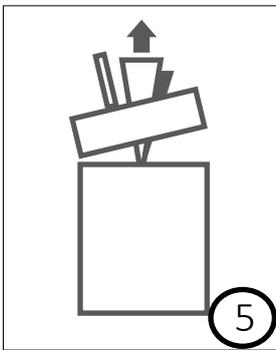


5

Das erste Tuch durch die Öffnung im Deckel stecken.

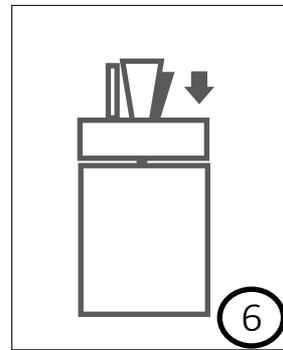


6

Verpackung festhalten und Deckel fest verschließen.

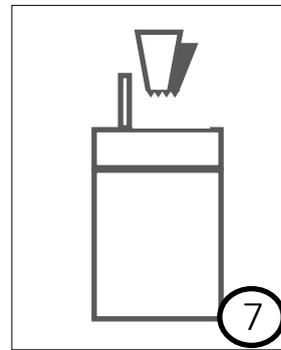

7

Verpackung mit einer Hand festhalten und das erste Tuch abreißen. Kontakt zum darauffolgenden Tuch vermeiden.

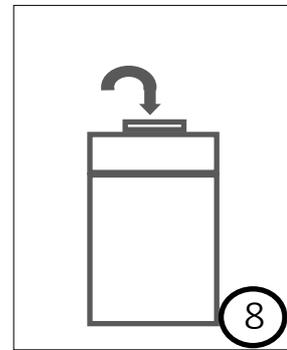

8

Klappdeckel wieder fest verschließen.

9

Das entnommene Tuch auf der Handfläche entfalten. (Die empfohlene Anwendungstemperatur liegt zwischen 19°C und 21°C).

10

Die zu reinigenden Flächen/ Instrumente vollständig mit dem ACTOSEPT[®] AF TÜCHER benetzen in einer Bewegung - von der sauberen zur kontaminierten Fläche hin - abwischen, 30 Sek. einwirken lassen. NICHT TROCKEN REIBEN!

11

Vor der Benutzung der gereinigten Flächen/ des gereinigten Gerätes warten bis der Flüssigkeitsfilm vollständig verdunstet und die Oberfläche trocken ist.

12

ACTOSEPT[®] AF TÜCHER und Handschuhe fachgerecht entsorgen!

13

Es wird empfohlen nach Gebrauch den Deckel des ACTOSEPT[®] AF TÜCHER-Spenders mit ACTOSEPT[®] AF TÜCHERN zu desinfizieren. Bei Raumtemperatur lagern.

Diese Anweisung einschl. aller Teile, ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwendung außerhalb der engen Grenzen des Urheberrechtsgesetzes ist ohne ausdrückliche schriftliche Zustimmung der ACTO GmbH unzulässig und strafbar.