

# ACTOSEPT® AF

Schnelle alkoholhaltige Sprühdeseinfektion für medizinische Geräte und Oberflächen

Art.-Nr. 05.2301.500  
05.2301.1  
05.2301.4500  
05.2301.5



UN 1170  
GEFAHR!



dermatest-garantie.de




**ACTO GmbH**  
Büchnerstr. 11  
38118 Braunschweig  
info@actogmbh.com




**+49 (0) 531 239 50 80**  
(Mo-Fr 9.00 - 16.30 Uhr) Ortstarif

Inhaltsstoffe: In 100 g Lösung sind enthalten: 50 g Ethanol; 10 g 2-Propanol; 0,05 g Didecyldimethylammoniumpropionat und Hilfsstoffe.

**WICHTIG:** Bitte vor Anwendung Sicherheitsdatenblatt und Produktinformationsblatt lesen und verstehen.

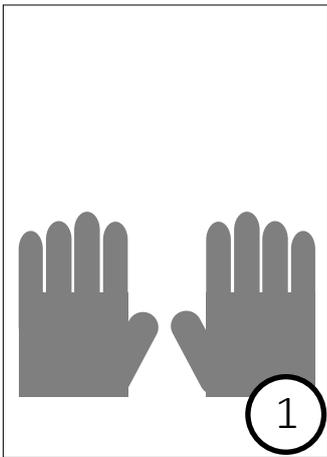


Handschuhe sind vor Anwendung anzuziehen.

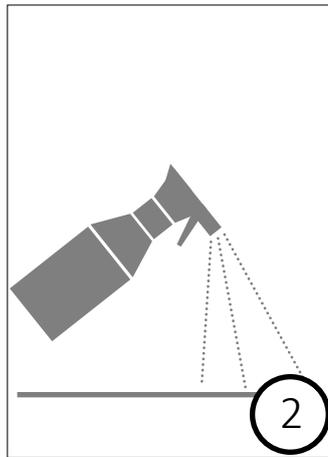

Oberflächen/Geräte aus ca. 30 cm Entfernung benetzen.



Einwirkzeit abwarten.

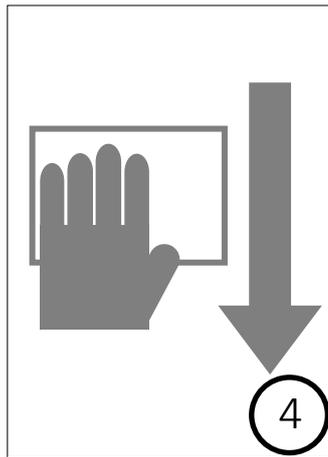

Mit einem sauberen Tuch in einer Bewegung - von der sauberen zur kontaminierten Fläche hin - abwischen und lufttrocknen lassen. NICHT TROCKEN REIBEN!

Wirkungsspektrum	Einwirkzeit	Konzentration
viruzid (Corona-, Rota-, Vaccinia und Ebolaviren, HBV, HIV, HCV, BVDV)	30 Sek.	80 %
bakterizid (inkl. MRSA, VRE, A. baumannii)	30 Sek.	100 %
tuberkulozid	30 Sek.	100%
fungizid (C. albicans)	30 Sek.	100 %

**Merkmale:**

- Geeignet für die Desinfektion alkoholbeständiger Oberflächen, Geräte und Inventar in Krankenhäusern, Arzt- und Zahnarztpraxen sowie Pflegeheimen (z.B. OP-Tische, Inkubatoren, Dialysegeräte u.a.).
- Frei von Aldehyde, Phenolen, Farb- und Geruchsstoffen

**Empfohlene Anwendungstemperatur:**

- 19°C - 21°C

**Lagerung:**

- Im Originalbehälter, dicht verschlossen, an einem kühlen, gut belüfteten Ort und bei **Raumtemperatur** lagern
- Von Kindern fernhalten

Diese Anweisung einschl. aller Teile, ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwendung außerhalb der engen Grenzen des Urheberrechtsgesetzes ist ohne ausdrückliche schriftliche Zustimmung der ACTO GmbH unzulässig und strafbar.