

# ACTO<sup>®</sup> SURGICAL MASK

## Einwegmasken - Typ II R

- ✓ 3-lagig (Spinnvlies / Meltblown / Spinnvlies)
- ✓ Hoher Tragekomfort
- ✓ Latexfrei und luftdurchlässig
- ✓ Ultraschall genäht
- ✓ Elastische Ohrschlaufen
- ✓ Integrierter Nasenflügel, anatomisch einstellbar
- ✓ CE-gekennzeichnet



Anti Staub



Anti-Tropfen



bequem und  
luftdurchlässig



dreischichtiges  
Design



feines  
Material



einstellbarer  
Nasenclip

## ACTO<sup>®</sup> SURGICAL MASK

ACTO<sup>®</sup> SURGICAL MASK besteht aus Vliesstoff mit absoluter Top-Qualität, sehr weich und angenehm zu tragen. Es ist latexfrei und luftdurchlässig.

### Verwendungszweck

ACTO<sup>®</sup> SURGICAL MASK ist eine 3-lagige Einweg Mund-Nasen Schutzmaske mit extra weichen elastischen Ohrschlaufen. Es entspricht der Sicherheitsklasse Typ II R gemäß der Norm EN 14683. Geeignet sowohl für medizinisches Fachpersonal und Patienten in Krankenhäusern, Operations- räumen oder anderen medizinischen Einrichtungen mit ähnlichen Anforderungen als auch für Patienten und anderen Personen, um das Risiko der Ausbreitung von Infektionen, insbesondere in epidemischen oder pandemischen Situationen zu verringern. Auch geeignet für den Einsatz in der Lebensmittel-, Catering-, und Backwarenindustrie, in Kosmetik-, Nagel-, und Tätowierungsstudios oder wo ein hohes Kontaminationsrisiko besteht.

	Test Methode	Ergebnis	Grenze	Ergebnis
ACTO <sup>®</sup> Surgical Mask	Atmungsaktivität Druckdifferenz (Pa/cm <sup>2</sup> ) EN ISO 14683+AC:2019 (5.2.3) Anhang C	33.9 Pa/cm <sup>2</sup>	<40 Pa/cm <sup>2</sup> Typ I und Typ II Masken	Erfüllt
	Spritzwiderstand (Blut) Druck des Spritzwiderstandes (kPa) EN 14683:2019 + AC (5.2.4)	>21.3k Pa	≥16 kPa Typ IIR Maske	Erfüllt
	Mikrobiologische Reinheit (KBE/g) EN ISO 14683+AC:2019 (5.2.5) Anhang D EN ISO 11737-1	10 cfu	≤30 (KBE/g)	Erfüllt
	Bakterielle Filterleistung (BFE), EN ISO 14683+AC:2019 (5.2.2) Anhang B	%98,1	Typ I ≥95 Typ II und IIR ≥98	Erfüllt

### Das richtige Anlegen einer Maske



**1** Bevor Sie eine Maske anlegen, sorgen Sie dafür, dass Ihre Hände sauber sind, gegebenenfalls Hände mit einem Desinfektionsmittel desinfizieren oder die Hände gründlich mit Seife und Wasser waschen.



**2** Bedecken Sie Mund, Nase und Kinn mit der Maske und stellen Sie sicher, dass die Maske an den Seiten möglichst dicht abschließt, und keine Lücken bestehen bleiben.



**3** Berühren Sie die Maske nicht während der Verwendung; wenn Sie dies tun, reinigen Sie Ihre Hände mit einem Desinfektionsmittel oder waschen Sie Ihre Hände gründlich mit Seife und Wasser.



**4** Ersetzen Sie die Maske durch eine neue, saubere, trockene Maske, sobald diese durchfeuchtet oder beschädigt ist. Verwenden Sie Einwegmasken nicht erneut. So entfernen Sie die Maske: Entfernen Sie diese von hinten, indem Sie die Schlaufen über die Ohren ziehen (Vorderseite der Maske nicht berühren)



**5** Verwerfen Sie diese sofort in einem geschlossenen Behälter; Hände mit einem Desinfektionsmittel reinigen oder die Hände gründlich mit Seife und Wasser waschen.

Lieferformen		
Einheit	VPE	Artikel-Nr.:
50 St.	30	13.6100.50



**ACTO GmbH**  
Head Office & Factory  
Schulstrasse 8 • 31613 Wietzen-Holte / Germany  
Tel: +49 (0) 5022 9801-0 • Fax: +49 (0) 5022 9801-37

**Braunschweig Office**  
Büchnerstrasse 11 • 38118 Braunschweig / Germany

www.actogmbh.com • info@ctogmbh.com

# ACTO<sup>®</sup> 95

## FFP2 Atemschutzmaske



5 Schutzschichten

**Effektiver Schutz** vor Mikro-Tröpfchen,  
Partikeln und Aerosolen

- ✓ 5 Schichten aus Non-Woven und Meltblown Gewebe
- ✓ Ergonomisches Design
- ✓ RKI Empfehlung: FFP2/FFP3 zum Schutz vor Corona

**PFE**  
**≥ 95%**


EN149:2001+A1:2009



Extra hautfreundliches  
Vlies



Hoher Tragekomfort mit  
hervorragender Passform

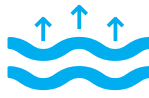

Luftdurchlässigkeit mit  
geringem Atemwiderstand



Flexibler  
Nasenbügel



Staubschutz



Einheitsgröße,  
passend für jeden



Hautfreundlich



Wasserabweisend  
und Resistent gegen  
Flüssigkeiten



5 Schutzschichten



## ACTO<sup>®</sup> 95

### Effektiver Schutz vor Mikro-Tröpfchen, Partikeln und Aerosolen

#### Gebrauchsanleitung:

- Bevor Sie die Maske berühren, desinfizieren Sie die Hände mit einem Handdesinfektionsmittel, oder waschen Sie die Hände mit Wasser und Seife.
- Stellen Sie vor Gebrauch sicher, dass die partikelfiltrierende Atemschutzmaske einschliesslich aller Bestandteile keine Löcher, Tropfen, Risse oder sonstige Schäden aufweist.




1. Die Maske öffnen und zuerst über das Kinn und dann über die Nase ziehen.
  2. Die Schlaufen hinter den Ohren platzieren und die Maske dabei nicht anfassen. Achten Sie darauf, dass die Maske Nase, Mund und Kinn überdeckt und rundherum ein möglichst dichter Abschluss sichergestellt ist.
  3. Den Nasenclip mit den Zeigefingern vorformen und der Nase anpassen.
- Verwenden Sie Ihre Maske nicht wieder, wenn Sie nach einer Aerosolberührung mit Körperflüssigkeiten kontaminiert wurde, oder wenn Sie nicht frei atmen können.
  - Entsorgen Sie die Maske im medizinischen Abfall.
  - Denken Sie daran, dass die Aussenfläche der Maske schmutzig ist, berühren Sie die Aussenfläche nicht mit der Hand.
  - Führen Sie nach dem Abnehmen der Maske eine Handhygiene durch.

Diese Atemschutzmaske enthält keine Bestandteile aus Naturkautschuklatex. Es kann dazu beitragen, die Inhalationsexposition gegenüber bestimmten biologischen Partikeln in der Luft zu reduzieren (z.B. Viren, Schimmel, Bakterien und Allergie auslösende Partikel).

#### Hinweise Für Den Benutzer:

Diese Atemschutzmaske erfüllt die Anforderungen der EN 149:2001+A1:2009, filtrierende Atemschutzmaske zur Verwendung gegen Partikel.

Sie sollte zum Schutz des Trägers vor Feststoffen und luftgetragenen Partikeln & Aerosolen verwendet werden. Die richtige Auswahl, Schulung, Verwendung und angemessene Wartung sind entscheidend dafür, dass das Produkt zum Schutz des Trägers vor bestimmten luftgetragenen Schadstoffen & Aerosolen beiträgt. Vor dem Einsatz muss der Träger gemäss den Gesundheits- und Sicherheitsrichtlinien im Umgang mit der kompletten Atemschutzmaske geschult / instruiert werden.

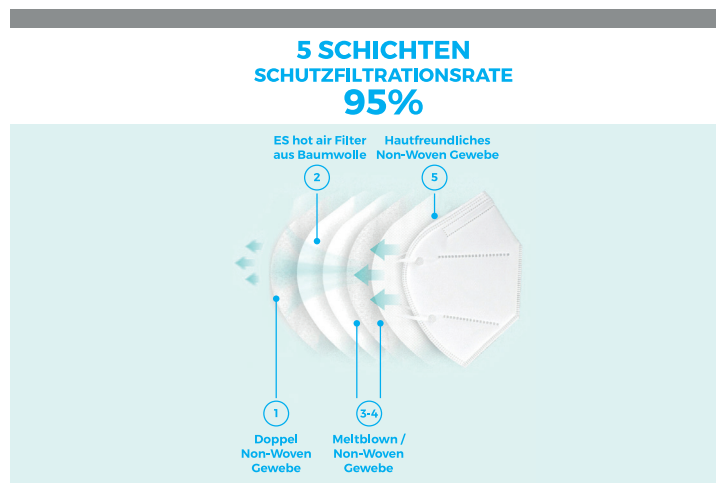

Lieferformen		
Einheit	Verpackungseinheit	Artikel-Nr.
1 Box (10 Pcs)	42	13.6378.10

**ACTO GmbH**  
Head Office & Factory  
Schulstrasse 8 • 31613 Wietzen-Holte / Germany  
Tel: +49 (0) 5022 9801-0 • Fax: +49 (0) 5022 9801-37



**Braunschweig Office**  
Büchnerstrasse 11 • 38118 Braunschweig / Germany

[www.actogmbh.com](http://www.actogmbh.com) • [info@actogmbh.com](mailto:info@actogmbh.com)

